



ЗАХИСТ Мератин

ІНТИМ ГЕЛЬ
ДЛЯ УСУНЕННЯ СУХОСТІ

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням продукту, оскільки вона містить важливу інформацію для пацієнта щодо правильного застосування виробу. Збережіть інструкцію для використання в майбутньому.

ОПИС МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Вагінальний гель – це високоякісний гель, який створює захисний шар на слизових оболонках, зволожує їх і захищає від пошкодження епітеліальної поверхні внаслідок сухості піхви під час статевого акту, гінекологічного огляду або фізичної активності. Застосування цього виробу покращує еластичність піхви, підтримує та відновлює фізіологічний рН піхви, що сприяє підтримці здорової мікробної флори в піхві та зменшує неприємні запахи.

СКЛАД

1 аплікатор містить: гіалуронат натрію, молочну кислоту, гліцерин, пропіленгліколь, гідроксиетилцелюлозу, 2-фенілетиловий спирт, каприлілгліколь, очищену воду.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для жінок репродуктивного віку та жінок у менопаузі:

- **щоб допомогти зняти дискомфорт і сухість, свербіж та печіння слизової піхви при**
 - атрофії слизової піхви, - естрогенній недостатності.
 - тривалому стресі.
- **щоб допомогти зволожити вагінальний епітелій:**
 - після хірургічних і гінекологічних процедур,
 - при саднах або інших механічних пошкодженнях слизової оболонки піхви,
 - після пологів,
 - після хімотерапії, променевої терапії, кріотерапії,
 - після лазерних процедур,
 - у разі змін, викликаних прийомом гормональних препаратів,
 - в період перименопаузи.



Гель сприяє зволоженню слизової оболонки піхви, що призводить до зменшення дискомфорту під час статевого акту.

Продукт захищає від негативних змін у мікробній флорі піхви та рН (викликаних подорожжями, басейнами, сауною, фітнесом, антибіотиками) шляхом зволоження та підтримки природного рН піхви.

Продукт зменшує неприємний вагінальний запах.

- Просте та гігієнічне застосування продукту забезпечує високий комфорт використання.
- Без запаху.
- Негормональний продукт.
- Гіпоалергенний продукт.
- Не містить PEG, парабенів, ПАП, в тому числі: SLS, SLES.

МЕХАНІЗМ ДІЇ


Після нанесення вагінального гелю на слизові оболонки піхви створюється зволожуючий захисний шар, який захищає поверхню вагінального епітелію від механічних пошкоджень і допомагає зменшити дискомфорт, пов'язаний з відчуттям сухості, напруги, свербіння та печіння в області слизової оболонки піхви. Наявність молочної кислоти в продукті допомагає підтримувати правильний вагінальний рН $\leq 4,5$ (кислий) та зменшує неприємний вагінальний запах.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням ретельно вимийте руки!

1. Зніміть захисний ковпачок з аплікатора.
2. Помістіть шийку аплікатора у піхву.
3. Видавіть весь вміст аплікатора в піхву.
4. Видаліть аплікатор.
5. Після використання аплікатор необхідно утилізувати.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОДИН І ТОЙ ЖЕ АПЛІКАТОР ПОВТОРНО!

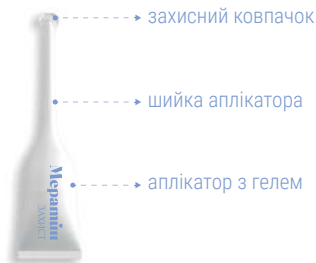



Один повний аплікатор необхідно використовувати щовечора протягом 7 днів поспіль, якщо лікар не призначив інше.

Надалі, щоб зберегти ефективність продукту, рекомендується використовувати один аплікатор кожні 2-3 дні до зникнення симптомів.

Для зменшення дискомфорту під час статевого акту використовувати 1 дозу гелю безпосередньо перед статевим актом.

Не використовуйте продукт довше 30 днів.

У разі пропусків під час використання продукту не застосовуйте подвійну кількість.

Якщо симптоми не зникають, проконсультуйтеся з лікарем перед подальшим використанням продукту.

Продукт призначений тільки для вагінального застосування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Не застосовувати при підвищеній чутливості (алергії) до будь-якого з інгредієнтів продукту.
- Якщо під час використання продукту виникає печіння, свербіж або почервоніння, негайно припиніть його використання, а якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.
- Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням під час вагітності або годування груддю.
- Не використовуйте, коли намагаєтеся завагітніти, оскільки рН гелю може негативно вплинути на сперму.
- Не використовувати під час менструації.
- Якщо симптоми сухості піхви не зникають, зверніться до лікаря.
- Якщо виникла вагінальна інфекція, використовуйте продукт лише після консультації з лікарем.
- Уникайте випадкового потрапляння гелю на слизову оболонку очей, носа або рота.
- Не використовуйте разом з місцевими анестетиками або іншими вагінальними продуктами, включаючи вагінальні протизапальні засоби, оскільки це може погіршити їх дію.
- Через вміст молочної кислоти можуть виникнути незначні шкірні реакції (легке печіння або свербіж), особливо у випадку сильної сухості піхви. Ці симптоми є тимчасовими і зникають природним шляхом.
- Не використовуйте продукт, якщо аплікатор пошкоджений.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Продукт призначений тільки для вагінального застосування.
- Не ковтати!

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте продукт в оригінальній упаковці при кімнатній температурі 15°C – 25°C.
- Тримайте подалі від світла та тепла.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте продукт, якщо первинна упаковка пошкоджена.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка товару містить: 7 одноразових аплікаторів з гелем та інструкцію із застосування.

Інформація на упаковці

	Знак відповідності технічним регламентам		Номер партії
	Містить достатньо для 7 застосувань		Температурні межі
	Дивіться інструкцію із застосування		Крихкий
	Дата закінчення терміну придатності		Медицинний виріб
	Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО		Нестерильний
			Виробник



Виробник:

ЛАБОРАТУАР ЛІДЕАЛЬ Парізьєн Сп. з о.о.

Вул. Огородова 8, 32 – 064, Негошовіце, Польща

Веб-сайт: <http://www.lideal.pl/en/>

Уповноважений представник виробника в Україні:

Мілі Хелскере Лімітед

01032, Україна, Київ, Шевченківський р-н, бульвар Т.Шевченка, Будинок 335, БС5

e-mail: office@mili.net.ua,

Тел.: +38044 4981334



UA-TR-120